



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA LABORATORIO INFECCIÓN E INMUNIDAD

INFORME GENERAL

**CÓDIGO****MI-INV-LAB-FO-29****VERSIÓN****1****VIGENCIA****2020****Página****1 de 9**

NOMBRE DEL LABORATORIO:	LABORATORIO DE INFECCIÓN E INMUNIDAD
FECHA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2020
NOMBRE DEL INFORME:	INFORME DE PRIMERA PARTE DE VALIDACIÓN DE AMPLIFICACIÓN DE SARS CoV2
PRESENTADO POR:	EQUIPO DE TRABAJO DE SARS CoV2
CARGO:	BACTERIÓLOGOS Y COORDINADOR DE LABORATORIO
OBJETIVO DEL INFORME:	DETALLAR LA METODOLOGÍA Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA rt-PCR PARA SARS CoV2

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECEPCIÓN DE MUESTRAS:

Las muestras fueron enviadas por la secretaría de Salud, las cuales fueron relacionadas en el documento en donde se detallaban cada una de las muestras enviadas y las características de los reactivos que se iban a utilizar en el laboratorio como Lote, Fecha de Vencimiento, Referencia y Volumen.

Imagen 1. Foto Carta de Relación de muestras

Neiva, 5 de noviembre del 2020

Doctor:

CARLOS NARVAEZ

Coordinador de Laboratorio de inmunidad e infectología

Universidad Surcolombiana

Ciudad.

Cordial saludo,

Hago entrega de las siguientes 40 muestras respiratorias para SARS-Cov-2, el cual serán utilizadas para la verificación y/o validación del proceso.

22937-150001	15000122995	150001223017	• NO ✓ 23036
22985-150002	15000122996	150001223026	NO 23037
22987-150003	15000122997	• NO ✓ 23027	1500027 23038
22988-150004	150001323002	150002023028	1500028 23039
22989-150005	23003	1500021 23029	1500029 23040
22990-150006	• NO ✓ (23004)	1500022 23030	1500030 23041
22991-150007	150001523005	1500023 23031	1500031 23042
• NO ✓ (22992)	150001623010	1500024 23032	1500032 23043
1500008 22993	1500017 23016	1500025 23033	1500033 23044
1500009 22994	NO ✓ 22995	1500026 23035	1500034 23056

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



Según el documento de relación con las muestras recepcionadas encontramos:

22937 cuatro Viales	22995 dos Viales	23017 dos Viales	23036 un Vial
22985 dos Viales	22996 dos Viales	23026 dos Viales	23037 No se encontraba
22987 dos Viales	22997 dos Viales	23027 un Vial	23038 dos Viales
22988 dos Viales	23002 dos Viales	23028 dos Viales	23039 dos Viales
22989 dos Viales	23003 dos Viales	23029 dos Viales	23040 dos Viales
22990 dos Viales	23004 No se encontraba	23030 dos Viales	23041 dos Viales
22991 dos Viales	23005 dos Viales	23031 dos Viales	23042 dos Viales
22992 un Vial	23010 dos Viales	23032 dos Viales	23043 dos Viales
22993 dos Viales	23016 dos Viales	23033 dos Viales	23044 dos Viales
22994 dos Viales		23035 dos Viales	23056 dos Viales
22922 No Relacionado	23057 No Relacionado		

Imagen 2. Foto de las muestras recibidas:






SC 7356-1

SA-CERES 58720

OS-CERES 58755

Imagen 3. Foto de muestras recibidas

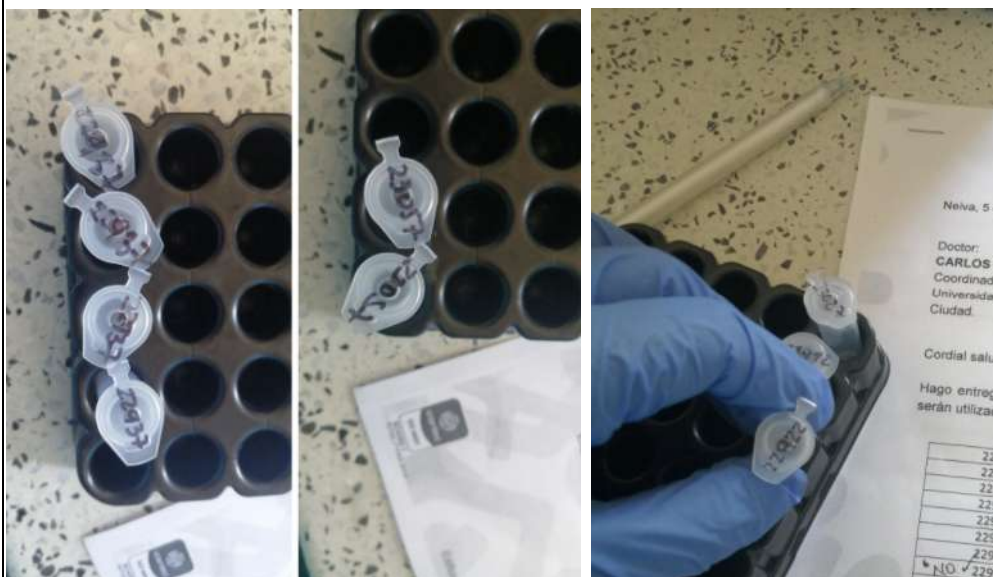

Las muestras que se seleccionaron para trabajar fueron las que tenían el volumen suficiente ya que en cada vial encontramos menos de 200 μ L, por lo cual casi todas las que se seleccionaron fueron las que tenían dos viales. Ya teniendo las muestras seleccionadas, se les asignó un número de código interno del laboratorio de Infección e Inmunidad, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Asignación de códigos por muestra:

22937 = IS00001	22995 = IS00010	23026 = IS00019	23039 = IS00028
22985 = IS00002	22996 = IS00011	23028 = IS00020	23040 = IS00029
22987 = IS00003	22997 = IS00012	23029 = IS00021	23041 = IS00030
22988 = IS00004	23002 = IS00013	23030 = IS00022	23042 = IS00031
22989 = IS00005	23003 = IS00014	23031 = IS00023	23043 = IS00032
22990 = IS00006	23005 = IS00015	23032 = IS00024	23044 = IS00033
22991 = IS00007	23010 = IS00016	23033 = IS00025	23056 = IS00034
22993 = IS00008	23016 = IS00017	23035 = IS00026	23057 = IS00035
22994 = IS00009	23017 = IS00018	23038 = IS00027	MOCK

Extracción de Muestras:

Las muestras que llegaron del Laboratorio de Salud departamental ya se encontraban inactivadas con la proteinasa K, por lo cual, se procedió luego de ser marcadas, a dispensar 200 μ L de cada una en la placa asignada para muestras del KingFisher Flex para continuar con la extracción. La mezcla binding y la dilución del Etanol se realizó de la siguiente manera teniendo en cuenta el protocolo entregado por el asesor científico de Equipos y Laboratorios de Colombia quién estuvo con nosotros en todo el procedimiento, aquí se tuvo en



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA LABORATORIO INFECCIÓN E INMUNIDAD

INFORME GENERAL



SC 7356-1

SA-CERE 58720

OS-CER 58755

CÓDIGO

MI-INV-LAB-FO-29

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2020

Página

5 de 9

HOJA DE TRABAJO rt-PCR SARS CoV-2

Nombre del analista: Fernando Trujillo lab I&F
 KIT: Vianore Lote No.: RT-G-VSNC0212H
 Fecha de vencimiento: 31-08-2022
 Fecha de realización del ensayo: 05/10/2020

Inicio de procesamiento:
 Hora: Temperatura: Humedad:
 Terminación de procesamiento:
 Hora: Temperatura: Humedad:

RT-PCR SARS CoV-2

COPIA CONTROLADA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	+ CPOS	-IS00006	IS00014*							IS00033-	IS00025+	IS00017-
B	- CNEG	+IS00007	IS00015*							IS00034+	IS00026+	IS00018-
C	- MOCK	-IS00008	+IS00016							IS00035+	IS00027-	IS00019-
D	+IS00001	+IS00009									IS00028+	IS00020+
E	-IS00002+	+IS00010									IS00029+	IS00021+
F	+IS00003	+IS00011									IS00030+	IS00022+
G	-IS00004	+IS00012									IS00031-	IS00023+
H	-IS00005+	-IS00013									IS00032-	IS00024*

Control positivo gen E₁₀: Proporcionado por el INS
 Control positivo gen RdRp₁₀: Proporcionado por el INS

- Negativo
 + Positivo
 * En duda

Lectura e Interpretación de Resultados:

Los resultados fueron exportados directamente a nuestra nube de datos y desde allí, todo nuestro grupo de trabajo y el asesor científico realizamos la interpretación de cada una de las muestras. Los criterios que se tuvieron en cuenta para determinar el resultado POSITIVO o NEGATIVO fueron:

Gen ORF1ab (FAM)	Gen N (ROX)	Control Interno (HEX)	Control Negativo	Control Positivo	Interpretación
+	+	+/-	-	+	SARS-CoV-2 Positivo
-	-	+	-	+	SARS-CoV-2 Negativo
+	..*	+/-	-	+	SARS-CoV-2 Positivo*
..**	+	+/-	-	+	SARS-CoV-2 Negativo**
+	+	+	+	+	Inválido
-	-	-	-	-	Inválido

Tabla 5. Interpretación

+: curva de amplificación

..: sin curva de amplificación

* Repetir la extracción y el ensayo de nuevo, en caso de que gen N continúe siendo negativo la interpretación será SARS-CoV-2 Positivo.

** Repetir la extracción y el ensayo de nuevo, si el gen ORF1ab continúa siendo negativo la interpretación será SARS-CoV-2 Negativo (Posibles infecciones de otros coronavirus).

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.




También y según criterios de la técnica, se debe tener en cuenta que una muestra se considera POSITIVA, si el valor CT obtenido es menor de 38 y el control Interno muestra o no una gráfica de amplificación ya que en ocasiones, la detección del control interno no es necesaria porque la presencia de un alto número inicial de copias del ácido nucleico diana puede causar una amplificación preferencial de esta última.

Una muestra se considera NEGATIVA, si no se detecta una curva de amplificación por encima del threshold y el control interno si la presenta. La inhibición de la reacción de PCR puede ser excluida por la amplificación del control interno.

Ya teniendo claro estos criterios se procede al análisis de cada uno de los resultados, los cuales fueron informados de la siguiente manera:

Control Positivo:

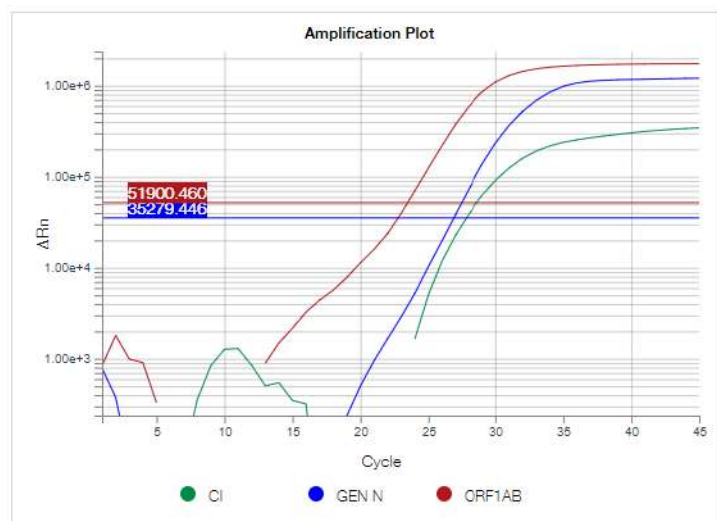

Sample#	Target#	Num of Replicates	Cq Mean
CPOS	CI	1	23.298
CPOS	GEN N	1	26.888
CPOS	ORF1AB	1	23.527

Se observa que los target GEN N, ORF1ab y C1 tienen un valor de CT menor de 38 y se encuentran por encima del threshold y del control interno lo cual lo validan como resultado POSITIVO.



SC 17364-1

SA-CERES 18120

OS-CER 18125

CÓDIGO

MI-INV-LAB-FO-29

VERSIÓN

1


VIGENCIA

2020

Página

7 de 9


Control Negativo:

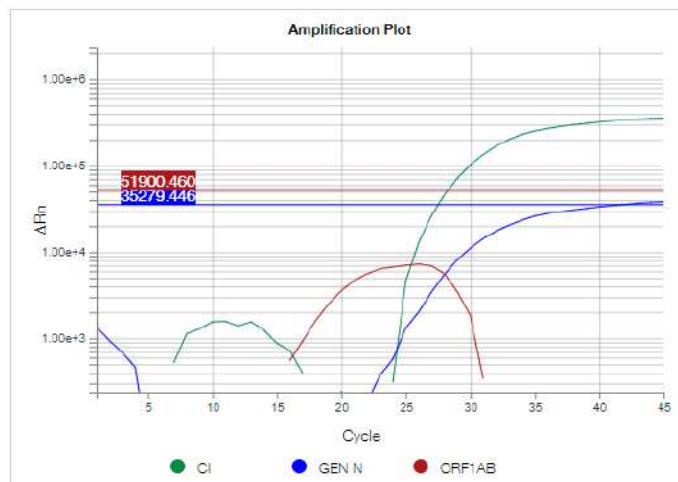

Sample#	Target#	Num of Replicates	Cq Mean
QNEG	CI	1	23.961
QNEG	GEN N	1	41.698
QNEG	ORF1AB	1	

En este resultado se puede observar que ambos target GEN N Y ORF1ab se encuentran amplificados después del CI sin superar el threshold y el CT es menor de 38 lo cual lo valida como resultado NEGATIVO.

MOCK:

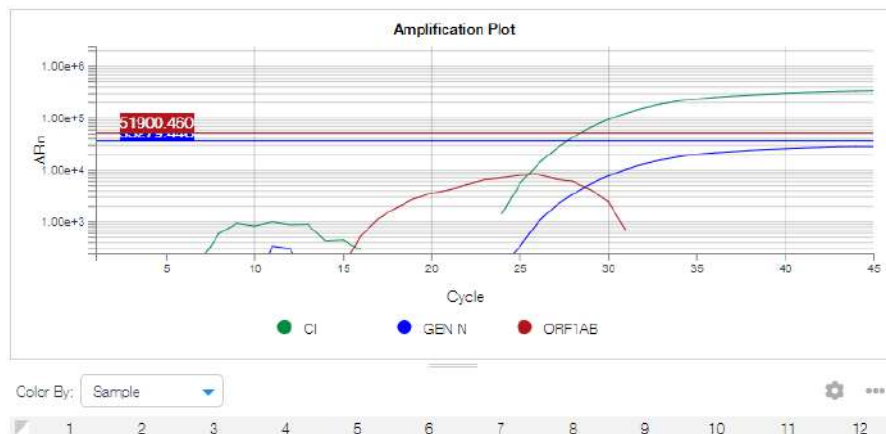

Sample#	Target# 1	Cq Mean
IS00028	CI	23.783
IS00029	CI	24.517
IS00030	CI	24.040
IS00031	CI	23.614
IS00032	CI	23.546
IS00033	CI	23.653
IS00034	CI	26.458
IS00035	CI	25.881
MOCK	CI	23.330

En el MOCK también podemos observar al igual que el control negativo que el GEN N y el ORF1ab no superan el threshold y se encuentran sin superar al CI y su CT es menor de 38 lo que lo valida como control NEGATIVO de la extracción.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA LABORATORIO INFECCIÓN E INMUNIDAD

INFORME GENERAL



CÓDIGO

MI-INV-LAB-FO-29

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2020

Página

8 de 9

Teniendo la validación de la corrida con los controles dentro de los parámetros esperados se dispone al análisis de los resultados de los pacientes, los cuales fueron los siguientes:

HOJA DE TRABAJO rt-PCR SARS CoV-2

Nombre del analista: Equipo de Trabajo I&I		Inicio de procesamiento:		
KIT: Viasure	Lote No. : REF. CT-VSNCO212H	Hora: 3:30 pm	Temperatura: 22° C	Humedad: 40%
Fecha de vencimiento: 31-08-2022		Terminación de procesamiento:		
Fecha de realización del ensayo: 05 de Noviembre de 2020		Hora: 3:30 pm	Temperatura: 22° C	Humedad: 40%


RT-PCR SARS CoV-2

COPIA CONTROLADA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	CPOS POS	IS00006 NEG	IS00014 REP							IS00033 NEG	IS00025 POS	IS00017 NEG
B	CNEG NEG	IS00007 POS	IS00015 REP							IS00034 POS	IS00026 POS	IS00018 NEG
C	MOCK NEG	IS00008 NEG	IS00016 POS							IS00035 POS	IS00027 NEG	IS00019 NEG
D	IS00001 POS	IS00009 POS									IS00028 POS	IS00020 POS
E	IS00002 NEG	IS00010 POS									IS00029 POS	IS00021 POS
F	IS00003 POS	IS00011 POS									IS00030 POS	IS00022 POS
G	IS00004 NEG	IS00012 POS									IS00031 NEG	IS00023 POS
H	IS00005 NEG	IS00013 NEG									IS00032 NEG	IS00024 REP

Tres de los resultados fueron seleccionados para repetir proceso (IS00014, IS00015 e IS00024) ya que la gráfica no muestra la claridad suficiente para validarlo como Negativo o Positivo ya que los target superan el control interno después del threshold como se observa en la gráfica siguiente:

IS00014:

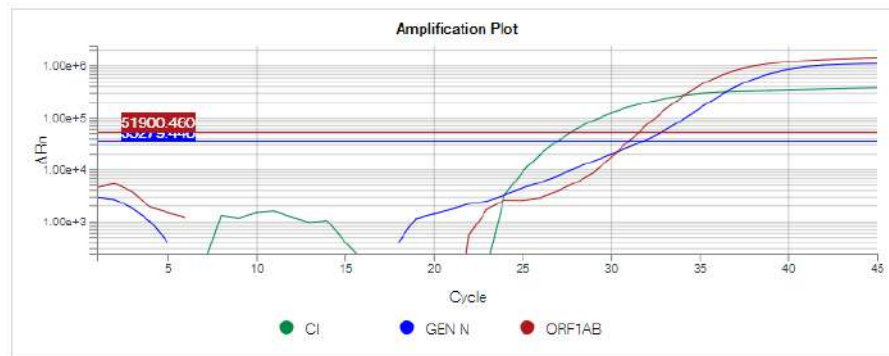

Sample#	Target* 1	Cq Me
IS00011	CI	25.731
IS00012	CI	25.966
IS00013	CI	23.553
IS00014	CI	22.954
IS00015	CI	23.588
IS00016	CI	26.283
IS00017	CI	23.358
IS00018	CI	23.650

Vigilada Mineducación


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



INFORME GENERAL


CÓDIGO MI-INV-LAB-FO-29 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2020 Página 9 de 9

IS00015:

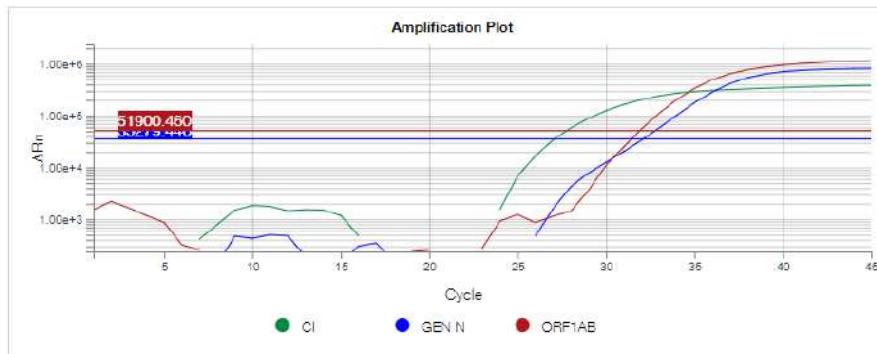

Sample#	Target* 1	Cq Me
IS00010	ORF1AB	24.923
IS00011	ORF1AB	16.130
IS00012	ORF1AB	16.782
IS00013	ORF1AB	
IS00014	ORF1AB	31.599
IS00015	ORF1AB	31.923
IS00016	ORF1AB	19.527
IS00017	ORF1AB	

IS00024:

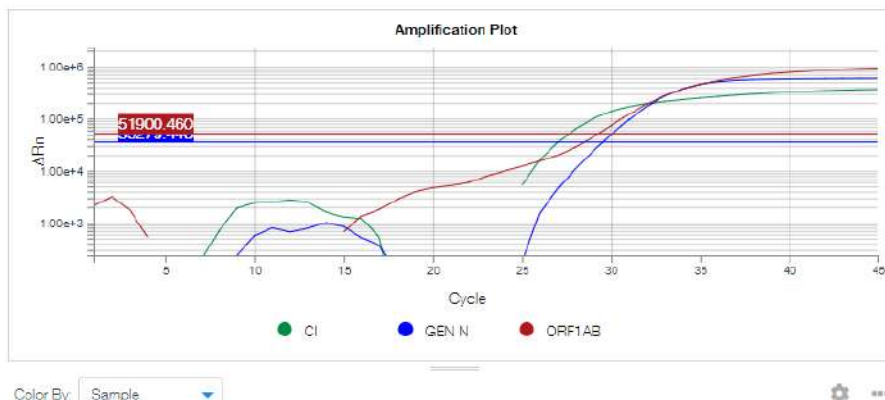

Sample#	Target* 1	Cq Me
IS00023	Ct	24.228
IS00024	Ct	24.160
IS00025	Ct	25.811
IS00026	Ct	25.982
IS00027	Ct	23.719
IS00028	Ct	23.783
IS00029	Ct	24.617
IS00030	Ct	24.040

Nombre: Carlos F. Narváez
Coordinador Laboratorio Infección e Inmunidad (I&I Lab)
SUPERVISOR

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.